



OCHRANNÝ ŠTÍT COVID

Situace začátku roku 2020 nás dovedla k výrobě odolných ochranných štítů. Vzhledem k vybraným materiálům je celý štít odolný běžným dezinfekcím a je opakovatelně použitelný.

Jde o univerzální ochranný prostředek, který je určen k ochraně osob při styku s infikovanými subjekty. Tento výrobek nemá žádnou certifikaci.



HLEDÍ

Materiál: PET-G o síle 0,8mm (běžně vyráběné štíty max. 0,5mm), odolný dezinfekčním prostředkům na bázi ethanolu a izopropylalkoholu, teplotní odolnost 80°C.

Opatřeno ochrannou fólií proti poškrábání (před použitím nutno odstranit).

ČELENKA A BRADA

Materiál: PET-G **v různých barvách**, odolný dezinfekčním prostředkům na bázi ethanolu a izopropylalkoholu, teplotní odolnost 80°C.


GUMIČKA

Materiál: silikonová pryž, odolná dezinfekčním prostředkům na bázi ethanolu a izopropylalkoholu, teplotní odolnost 200°C. Oka pro správné upnutí.


Štíty je možno objednat buď na našich webových stránkách www.dkmp.cz,
nebo na e-shopu firmy www.triumart.cz

NÁVOD NA SESTAVENÍ ŠTÍTU

Prostředek osobní ochrany pro práci ve ztížených podmínkách.
Finální kompletace provádějte v obličejové roušce a rukavicích.

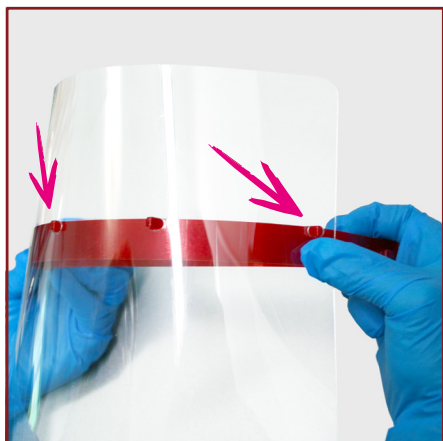

Odstraňte ze štítu ochrannou fólii. Očistěte čtyři piny a nasadte štít nejdříve na střed čelenky, pak přihněte kraje čelenky k plexi a zacvakněte oba konce do připravených dír ve štítě.

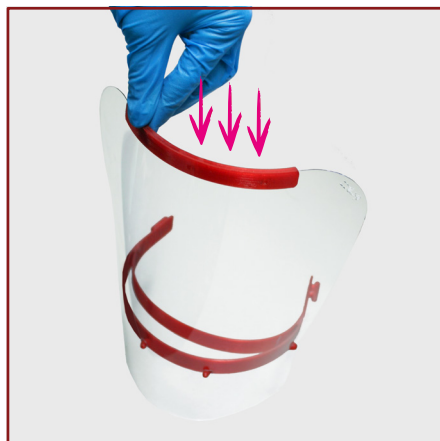

Štít si zapnete a nasadte spodní ochranu hledí, její piny musí v místě zacvaknout.



Gumičku nasadte na oba konce čelenky, délku upravte dle potřeby.



Sestavený štít před použitím otřete dezinfekcí. Sterilizace: ipa (min 75%), savo (1:10), ethanol (min 78%), virucidní roztoky, doba sterilizace 5 minut



dk metal
prominent s.r.o.

...dáváme vašim představám tvar...

VÍCE INFORMACÍ
O OCHRANNÝCH
ŠTÍTECH NAJDETE
ZDE

